

URGO Afty i drobne rany w jamie ustnej żel 6ml



Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	6ml
Podmiot odpowiedzialny	Polfa Łódź
Postać	płyn
Typ produktu	wyrób medyczny inny
Wiek	dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu

URGO NA AFTY DZIAŁA JUŻ PO 10. SEK., IZOLUJE RANĘ AŻ DO 4 GODZ.

NATYCHMIASTOWA ULGA W BÓLU

- Likwiduje ból w ciągu 10 sek. od aplikacji – 74%.*
- Po 3 dniach likwiduje stan zapalny – 100%.*

*Badanie kliniczne DERMSCAN Nr 05E0641PH,p.42/43

JAK DZIAŁA URGO NA AFTY I DROBNE RANY W JAMIE USTNEJ?

URGO na Afty i drobne rany w jamie ustnej, to leczniczy plaster w płynie, który:

- izoluje ranę od pokarmu i drobnoustrojów aż do 4 godzin,
- działa skutecznie, nawet w trakcie posiłku,
- ułatwia i przyspiesza gojenie,
- jest wodoodporny,
- jest dobrze tolerowany przy długotrwałym stosowaniu, np. przy urazach spowodowanych aparatami ortodontycznymi i protezami.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ URGO NA AFTY I DROBNE RANY W JAMIE USTNEJ?

Dzięki leczniczemu działaniu, Urgo na Afty wykazuje:

- działanie wielokierunkowe. Urgo izoluje aftę, tworząc optymalne warunki do jej wygojenia i szybko łagodzi ból,
- właściwości ochronne. Zapobiega uszkodzeniu afty np. przez ślinę i pożywienie,
- skuteczną ochronę. Nawet podczas jedzenia. Dzięki temu, znów możesz cieszyć się swoim posiłkiem,
- łatwa aplikacja. URGO na Afty i Drobne Rany Jamy Ustnej został opracowany z myślą o praktycznej, bezpiecznej i higienicznej aplikacji.

Badania wykazały, że 90% klientów jest usatysfakcjonowanych z działania produktu.

JAK STOSOWAĆ URGO NA AFTY I DROBNE RANY W JAMIE USTNEJ?

URGO na Afty i Drobne Rany w Jamie Ustnej przeznaczony jest dla dzieci od 6. roku życia i dorosłych.

- Nałóż cienką warstwę plastra w płynie na aftę.
- Pozostaw do wyschnięcia. Po 10 sekundach od aplikacji utworzy się ochronny film.
- Stosuj maksymalnie do 4. razy dziennie, do całkowitego wygojenia rany.
- Skład preparatu zapewnia higienę w stosowaniu i nie ma konieczności czyszczenia szpatułki.