

AkusTone spray do uszu 15ml



Cena: 19,02 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	15ml
Podmiot odpowiedzialny	Aflofarm
Postać	spray
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, niemowlęta, od 3 miesiąca życia

Opis produktu

AkusTone to wyrób medyczny, którego składniki w łagodny sposób rozpuszczają woskowinę zalegającą w zewnętrznym przewodzie słuchowym, umożliwiając zachowanie właściwej higieny uszu.

AkusTone:

- rozpuszcza zalegającą woskowinę
- przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych
- umożliwia zachowanie właściwej higieny uszu w przypadku nadmiernej produkcji woskowiny u dzieci lub osób noszących aparaty słuchowe lub słuchawki
- przeciwdziała zaleganiu wody w przewodzie słuchowym w trakcie kąpieli lub uprawiania sportów wodnych, u osób z tendencją do nawracających infekcji ucha zewnętrznego.

Jak stosować

Zastosowanie i sposób postępowania:

- Ze względu na formę aplikacji, produkt jest równomiernie rozprowadzany w przewodzie słuchowym, dzięki czemu nie ma konieczności głębokiego wsuwania aplikatora do ucha.

Dzieci i niemowlęta powyżej 3. miesiąca życia: 1 rozpylenie do przewodu słuchowego zewnętrznego

Dorośli: 1-2 rozpylenia do przewodu słuchowego zewnętrznego

Rozpuszczanie korków woskowinowych:

- stosować 3-5 razy dziennie, aż do rozpuszczenia zalegającej woskowiny

Działanie profilaktyczne oraz odpowiednia higiena uszu:

- stosować 1-2 razy w tygodniu w celu zapobiegania tworzeniu się korków woskowinowych
- stosować bezpośrednio przed kąpielą w celu przeciwdziałania zaleganiu wody w uchu

U dzieci i niemowląt wyrób powinien być aplikowany z zachowaniem ostrożności przez osobę dorosłą.

Aplikatora nie wsuwać zbyt głęboko do ucha, aby nie uszkodzić narządu słuchu. Po zastosowaniu wyrobu nie ma potrzeby dodatkowego przepłukiwania przewodu słuchowego. Przed pierwszym użyciem należy kilka razy energicznie nacisnąć pompkę dozownika w celu jego napełnienia i uzyskania prawidłowego rozpylenia wyrobu. Po użyciu wyrobu, końcówkę należy umyć pod bieżącą wodą i delikatnie osuszyć.

Skład:

- oliwa z oliwek
- olej migdałowy
- olej jojoba
- witamina E
- parafina ciekła
- polisorbat 80

Nie zawiera wody ani konserwantów.

Przeciwwskazania

Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności:

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować w przypadku chorób narządu słuchu, perforacji błony bębenkowej lub gdy w uchu znajduje się ciało obce.
- Nie stosować do oczu, nosa lub jamy ustnej.
- U niemowląt i małych dzieci poniżej 1. roku życia stosowanie wyrobu należy skonsultować z lekarzem.
- W przypadku rozpuszczania korków woskowinowych, jeżeli problemy ze słuchem lub inne dolegliwości nie ustąpią po 5 dniach stosowania, należy skonsultować się z lekarzem.
- Ze względów higienicznych zalecane jest stosowanie wyrobu przez jedną osobę.