

Akutol spray do bezbolesnego usuwani plastrów 35ml



Cena: 22,72 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	35ml
Podmiot odpowiedzialny	Salus International
Postać	spray
Typ produktu	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Akutol spray to idealne rozwiązanie na szybkie, łatwe i bezbolesne usunięcie plastra i opatrunku. Szczególnie polecany dla: dzieci i dorosłych aktywnie spędzających czas, osoby stosujące plastry hormonalne, nikotynowe, pacjenci między innymi ze stomią, cukrzycą.

Zastosowanie

Usuwanie plastrów kryjących i transdermalnych, opatrunków przyklejonych i innych wyrobów medycznych przyklejanych do powierzchni ciała (plastry nikotynowe, plastry kinesiotapingowe na bazie kleju akrylowego, elektrody EKG).

Sposób użycia

- Skóra w obrębie plastra powinna być czysta i sucha przed użyciem sprayu.
- Plaster należy spryskać sprayem z odległości 10-15 cm od skóry, w celu jego nawilżenia.
- Odczekać 10-15 sekund i zerwać plaster szybkim ruchem.
- W przypadku plastrów nieprzepuszczalnych należy spryskać róg plastra i po kilku sekundach podnieść krawędź plastra.
- Następnie ponownie spryskać i zdejmować plaster partiami do całkowitego usunięcia.

Składniki

Hexametyldisiloxane, Butane, Propane, Isobutane, Cyclopentasiloxane.

Ważne wskazówki

- Pojemnik pod ciśnieniem: podczas podgrzewania może eksplodować.

- Chronić przed ciepłem, gorącymi powierzchniami, iskrami, otwartym płomieniem i innymi źródłami ognia. Zakaz palenia.
- Pojemnika po użyciu nie przebijać ani nie spalać.
- Chronić przed promieniami słonecznymi.
- Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie wdychać sprayu.
- Chronić oczy i błony śluzowe przed aerozolem.
- Zawartość/opakowanie należy przekazać w punkcie zbiórki odpadów jako odpad niebezpieczny.