

Akuvax spray do uszu 15ml



Cena: 18,34 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	15ml
Podmiot odpowiedzialny	Oleofarm
Postać	spray
Substancja czynna	oliwa z oliwek
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 3 miesiąca życia

Opis produktu

Wyrób medyczny Akuvax stosuje się u niemowląt powyżej 3 miesiąca życia, dzieci oraz osób dorosłych w celu usunięcia korków woskowinowych oraz zalegającej woskowiny przy chorobach ucha zewnętrznego oraz profilaktycznie w utrzymaniu higieny uszu i zapobieganiu powstawaniu korków woskowinowych.

Stosowanie:

- w celu usunięcia korków woskowinowych oraz zalegającej woskowiny przy chorobach ucha zewnętrznego: niemowlęta powyżej 3 miesiąca życia, dzieci i osoby dorosłe – 3 naciśnięcia pompki dozującej 3 razy dziennie przez 5-7 dni;
- profilaktyczne stosowanie w celu utrzymania higieny uszu oraz zapobiegania powstawania korków woskowinowych: niemowlęta powyżej 3 miesiąca życia, dzieci i osoby dorosłe – 1-2 naciśnięcia pompki dozującej co 7 dni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

u niemowląt i dzieci do 12. Roku życia stosować po konsultacji z lekarzem. Nie należy manipulować zbyt głęboko aplikatorem, aby nie uszkodzić narządu słuchu. Ze względów higienicznych zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę.

Nie należy stosować wyrobu medycznego Akuvax:

- w przypadku nadwrażliwości lub alergii na oliwę z oliwek, w przypadku stwierdzonej lub podejrzewanej perforacji błony bębenkowej lub po operacji ucha, w przypadku wycieku z ucha, bólu ucha, podrażnienia, wysypki w uchu lub gdy istnieją zawroty głowy. Nie należy stosować wyrobu medycznego Akuvax do innych otworów ciała, na przykład do oczu, nosa, lub jamy ustnej.

Warunki przechowywania:

przechowywać w temperaturze od 10°C do 25°C w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować wyrobu medycznego po upływie 6 miesięcy od daty pierwszego użycia.

Skład:

oliwa z oliwek przygotowana według standardów farmaceutycznych.

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Akuvax należy zapoznać się z instrukcją używania dołączoną do opakowania. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wytworzono w Polsce.

Dlaczego Akuvax jest bezpieczny i wygodny w stosowaniu?

- skład przygotowany według standardów farmaceutycznych
- odpowiednie ciśnienie, która nie powoduje dyskomfortu przy aplikacji preparatu i nie stwarza ryzyka uszkodzenia ucha
- nie wymaga płukania uszu po użyciu preparatu
- wielkość opakowania sprawia, że buteleczka mieści się do każdej torebki oraz kieszeni