

Aquacel Ag+ Extra opatrunek hydrowłóknisty 5cm x 5cm x1 sztuka

Cena: 7,05 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Podmiot odpowiedzialny	Convatec
Postać	opatrunek
Typ produktu	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opatrunek hydrowłóknisty, na rany z biofilmem lub podejrzeniem biofilmu, płytkie i głębokie, z wysiękiem obfitym i umiarkowanym

Aquacel Ag + Extra to miękki, sterylny kompres opatrunkowy o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczych. Zbudowany jest z nietkanych włókien karboksy-metylocelulozy (Technologia Hydrofiber®) zawierających srebro jonowe, wzmocnione kwasem etylenodiaminotetraoctowym (EDTA) oraz chlorkiem benzetoniumowym (BeCl).

Niszczy biofilm i zapobiega jego odnawianiu, żeluje przy zetknięciu z wysiękiem z rany tworząc wilgotne środowisko sprzyjające gojeniu.

Charakterystyka:

- Jedyne opatrunki skutecznie niszczą biofilm i zapobiegają jego odnawianiu dzięki połączeniu Technologii Hydrofiber z unikalną Technologią Ag+
- Zwalcza bakterie i patogeny w ranie, włącznie z MRSA, VRE i E. Coli.
- Żeluje w kontakcie z wysiękiem, zatrzymując w strukturze opatrunku szkodliwe komponenty
- Idealnie dopasowuje się do kształtu rany, minimalizuje puste przestrzenie, w których mogą namnażać się bakterie
- Wymaga opatrunku wtórnego (np. AQUACEL® Foam, Granuflex®, Granuflex® ExtraThin, Versiva® XC™).

Zastosowanie:

AQUACEL® Ag+Extra można stosować na:

- rany zainfekowane lub ze zwiększonym ryzykiem infekcji; z małym, umiarkowanym i dużym wysiękiem

- owrzodzenia w przebiegu stopy cukrzycowej, owrzodzenia goleni: żyłne, tętnicze i o mieszanej etiologii oraz odleżyny (pośredniej i pełnej grubości);
- rany chirurgiczne;
- rany pourazowe;
- rany narażone na krwawienie, np. na skutek mechanicznego lub chirurgicznego oczyszczenia;
- rany onkologiczne z wysiękiem, np. ziarniaki - guzy skórne, rak grzybiasty, przerzuty skórne, mięsak Kaposiego, mięsak naczyniowy
- rany, w których bakterie są prawdopodobną przyczyną wolniejszego procesu leczenia, bądź te, w których nie obserwuje się postępu leczenia

Zakładanie opatrunku:

- W ranach z wysiękiem nie zwilża się opatrunku.
- Przy ranach płytkich pozostaw margines 1 cm opatrunku wokół rany.
- Wypełnij do 80% głębokości rany, ponieważ opatrunek zwiększy swoją objętość po wchłonięciu wysięku.
- Załóż opatrunek wtórny, dobrany do stanu rany i opatrywanej okolicy.
- Opatrunek może przybrać kolor wysięku.
- Opatrunek może pozostawać na ranie do 7 dni, chyba że przesiąknie do opatrunku wtórnego. Zalecany czas pozostawienia na ranie – 3 dni.

Usuwanie/zmiana opatrunku:

Jeśli opatrunek wysechł, aby go usunąć, należy zwilżyć go sterylną wodą lub roztworem 0,9% NaCl na 30 minut przed usunięciem i odczekać, aż opatrunek przybierze formę miękkiego, koherentnego żelu.