

Atrauman Ag opatrunek z maścią 5cm x 5cm x1 sztuka



Cena: 5,78 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Podmiot odpowiedzialny	Hartmann
Postać	opatrunek
Typ produktu	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Zastosowanie

do miejscowego leczenia ran zakażonych, zarówno przewlekłych jak i ostrych, oparzeń do 2 stopnia, ran objętych krytyczną kolonizacją bakteryjną oraz jako środek w zapobieganiu infekcjom podczas leczenia ran, szczególnie u pacjentów z osłabionym systemem immunologicznym.

Opatrunek jest typową warstwą kontaktową i powinien być przykryty wtórnym opatrunkiem chłonnym. W zależności od rodzaju rany można zastosować dowolnie wybrany opatrunek wtórny, jak np. TenderWet active, PermaFoam, Sorbalgon, Zetuvit czy zwykły kompres gazowy.

Charakterystyka

- Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne.
- Hydrofobowa siatka poliamidowa, stanowiąca materiał nośny opatrunku, pokryta jest srebrem metalicznym oraz impregnowana wodochłonna, nie zawierającą wazeliny maścią z triglicerydów (tłuszczów obojętnych).
- Pod wpływem wydzielin z rany opatrunek uwalnia jony srebra o bakterioobójczym działaniu (więcej informacji - patrz Leczenie ran zainfekowanych).
- Atrauman Ag zwalcza zarówno bakterie gram-ujemne jak i gramododatnie włącznie ze szczepami MRSA.
- Warstwa zewnętrzna materiału nośnego oraz maść zapobiegają przyklejaniu się opatrunku do rany, dzięki czemu daje się on bezboleśnie zmieniać.
- Maść pielęgnuje brzegi rany i zapewnia ich elastyczność.
- Dzięki temu, że opatrunek jest cienki, miękki i łatwy do układania, zapewniony jest jego dobry kontakt z podłożem rany.
- Charakteryzuje się wysokim stopniem przepuszczalności dla powietrza i pary wodnej a także dla wydzielin rany.
- Przy zmianie opatrunku na ranie nie pozostają trudne do usunięcia resztki maści (jak np. wazelina).

