



- A. ŻEL WSPOMAGAJĄCY ZAPŁODNIENIE FERTI·LILY  
 B. JAK UŻYWAĆ ŻELU FERTI·LILY  
 C. OSTRZEŻENIA  
 D. SKŁADNIKI  
 E. KONTAKT I OBSŁUGA KLIENTA

Żel wspomagający zapłodnienie FERTI·LILY to żel intymny, który wspomaga zapłodnienie. Udowodniono klinicznie, że żel FERTI·LILY jest przyjazny dla plemników.

#### A. ŻEL WSPOMAGAJĄCY ZAPŁODNIENIE FERTI·LILY

Żel wspomagający zapłodnienie FERTI·LILY został opracowany, aby pomóc parom starającym się o dziecko zapewniając nawilżenie i jednocześnie przedłużając żywotność plemników.

Badania kliniczne wykazały, że żel FERTI·LILY nie tworzy bariery dla nasienia i plemniki mogą przetrwać dłużej niż 24 godziny w kontakcie z żelem FERTI·LILY.

Żel wspomagający zapłodnienie FERTI·LILY jest izotoniczny, ma pH sprzyjające przeżywalności plemników i naśladuje właściwości kobiecej wydzieliny w dniach płodnych.

Żel FERTI·LILY można stosować w połączeniu z kubiczkiem wspomagającym zapłodnienie FERTI·LILY, aby zwiększyć swoje szanse na poczęcie.

#### CZY WIESZ, ŻE?

- Kobiety próbujące zajść w ciążę dwukrotnie częściej cierpią na suchość pochwy niż kobiety, które nie próbują zajść w ciążę.
- Stres może powodować suchość pochwy i zmniejsza prawdopodobieństwo poczęcia. Zrelaksuj się, nie martw się i spróbuj czerpać z tego przyjemność.
- Zwykłe lubrykanty intymne mogą być szkodliwe dla plemników i nie należy ich używać podczas prób poczęcia.
- Żel FERTI·LILY nie zawiera parabenów, które mogą negatywnie wpływać na jakoś nasienia.
- Niskie pH pochwy zabija plemniki. Podczas stosunku pH pochwy wzrasta na krótki czas, aby pomóc plemnikom przetrwać.
- Aby uzyskać więcej informacji i porad dotyczących poczęcia, odwiedź stronę [www.fertilylly.pl](http://www.fertilylly.pl)

#### B. JAK UŻYWAĆ ŻELU FERTI·LILY?



**WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU.** Przed zastosowaniem żelu FERTI·LILY przeczytaj uważnie poniższą instrukcję.



#### ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ, BY MÓC WRÓCIĆ DO NIEJ W PRZYSZŁOŚCI.

Niniejsza instrukcja użycia ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinna być traktowana jako porada medyczna ani nie zastępuje konsultacji z lekarzem. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy zdrowotne lub schorzenia, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem żelu FERTI·LILY.



Żel wspomagający zapłodnienie FERTI·LILY jest przeznaczony do tymczasowego stosowania w płodnych dniach cyklu miesięczkowego w celu złagodzenia suchości pochwy i/lub zwiększenia przyjemności. Korzystanie z testów owulacyjnych może pomóc w określeniu dni w cyklu miesięcznym o najwyższej płodności.

#### KROK 1:

Przed pierwszym użyciem usuń zabezpieczenie tubki.

#### KROK 2:

Przed stosunkiem zaaplikuj żel na zewnątrz pochwy lub na trzon penisu.

Wyciśnij niewielką ilość produktu na palec i/lub dłoń i nanieś go w okolicach intymnych. Zastosuj taką ilość żelu, aby uzyskać pożądanę nawilżenie.

#### KROK 3:

Po każdym użyciu szczególnie zamknij tubkę. Nie pozostawiaj tubki otwartej gdy nie używasz żelu.

#### C. OSTRZEŻENIA

- Jeśli masz wrażliwą skórę, przed pierwszym użyciem możesz nałożyć trochę żelu na wewnętrzną stronę łokcia, aby sprawdzić, czy Twoja skóra jest wrażliwa na jego składniki.
- Używaj żelu zgodnie z podanymi wskazówkami.
- Nie używaj produktu po upływie terminu ważności. Sprawdź datę ważności przed użyciem.
- Żel wspomagający zapłodnienie FERTI·LILY można stosować przez 3 miesiące po otwarciu.
- Żel wspomagający zapłodnienie FERTI·LILY nie jest środkiem antykoncepcyjnym i nie chroni przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową.**
- Nie używaj żelu wspomagającego zapłodnienie FERTI·LILY, jeśli masz infekcję drożdżakową lub bakteryjną ani w przypadku niedawnego podrażnienia lub otarcia okolic intymnych. Stosowanie żelu możesz wznowić, gdy infekcja całkowicie ustąpi.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek niepożądane objawy, przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Trzymaj z dala od dzieci.

Żel wspomagający zapłodnienie FERTI·LILY pomaga zwiększyć komfort i przyjemność współżycia, bez negatywnego wpływu na ruchliwość i przeżycie plemników. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na płodność, na które ten produkt nie może mieć żadnego wpływu. Jeśli po 12 miesiącach prób nadal nie jesteś w ciąży lub martwisz się o swoją płodność, skonsultuj się z lekarzem.

Żel wspomagający zapłodnienie FERTI·LILY jest przeznaczony do wspomagania poczęcia i nie gwarantuje zajścia w ciążę.

#### D. SKŁADNIKI (INCI)

Aqua, Phenethyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Fructose, Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Citric Acid.

Wiemy, że większość ludzi nie rozumie, czym są te wszystkie nazwy ani dlaczego znalazły się w tym produkcie, dlatego poniżej znajduje się krótkie wyjaśnienie wszystkich składników. Aqua to woda oczyszczona, która pomaga rozpuścić wszystkie pozostałe składniki. Hialuronian sodu to kwas hialuronowy, środek nawilżający, który jest również wytwarzany naturalnie przez nasze ciało. Guma ksantanowa to naturalny zagęszczacz stosowany również w żywności. Dzięki temu żel staje się mniej płynny i pozostaje tam, gdzie powinien. Alkohol fenetylowy to bardzo łagodny środek konserwujący, który zapobiega przedostawaniu się bakterii do żelu. Ma również lekki kwiatowy aromat, który nadaje żelowi różanego zapachu. Fruktaza to cukier owocowy. Używamy go, ponieważ plemniki czerpią energię z fruktozy i glukozy. Pozostałe składniki to kwasy i zasady używane do zrównoważenia pH oraz sole, aby stężenie soli było takie samo, jak w nasieniu.

#### E. KONTAKT I OBSŁUGA KLIENTA

Przestrzegaj instrukcji aby uzyskać pożądaną rezultaty. Odwiedź stronę [www.fertilylly.pl](http://www.fertilylly.pl) aby uzyskać więcej informacji. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail [fertilylly@salveo-pharma.com](mailto:fertilylly@salveo-pharma.com)

FERTI·LILY jest zarejestrowanym znakiem towarowym. To jest oficjalna instrukcja użycia żelu FERTI·LILY, której treść może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Odwiedź [fertilylly.pl](http://fertilylly.pl), aby uzyskać aktualne informacje.

**Wytwórca:**  
 FERTI·LILY  
 Mr. Treublaan 7  
 1097 DP Amsterdam  
 Holandia

**Dystrybutor w Polsce:**  
 Salveo Poland Sp. z o.o.  
 Okrężna 83,83a, lokal 5  
 02-933 Warszawa



Żel wspomagający zapłodnienie FERTI·LILY jest **wyroblem medycznym** klasy I

Data ostatniej aktualizacji: Maj 2022  
 LF77242001  
 22FI

