

Blephaclean chusteczki jałowe do powiek x20 sztuk

Cena: 44,99 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	20 sztuk
Podmiot odpowiedzialny	Thea
Postać	chusteczki
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

CO TO JEST BLEPHACLEAN®?

Blephaclean® to 20 hypoalergicznym, gotowym do użycia chusteczek przeznaczonych do dbania o higienę powiek i ich brzegów.

BLEPHACLEAN® jałowe chusteczki:

- delikatnie rozpuszczają oraz usuwają substancje zalegające na brzegach powiek
- nawilżają i łagodzą podrażnienia
- działają przeciwzapalnie i regenerująco
- nie zawierają konserwantów
- są hypoalergiczne

KIEDY STOSOWAĆ BLEPHACLEAN®

- Warto abyś stosował BLEPHACLEAN® zawsze jeżeli chcesz prawidłowo dbać o swoje oczy i powieki.
- Warto abyś stosował BLEPHACLEAN® gdy przygotowujesz się lub jesteś po okulistycznym zabiegu chirurgicznym np. zabiegu usunięcia zaćmy lub iniekcji doszklistkowych.

CO DAJE PROFESJONALNA HIGIENA BRZEGÓW POWIEK W PRZEBIEGU:

- Chorób powiek - usuwa złogi i bakterie, reguluje wydzielanie gruczołów Meiboma, poprawia jakość łez, redukuje dokuczliwe objawy

- Zespołu suchego oka - hamuje odparowanie łez, zwiększa skuteczność nawilżających kropli do oczu (sztucznych łez)
- Alergii ocznych - eliminuje alergeny i redukuje objawy alergii, ułatwia działanie kropli przeciwalergicznym do oczu
- Dolegliwości ocznych u osób noszących soczewki kontaktowe - poprawia jakość łez, redukuje dokuczliwe objawy
- Chorób dermatologicznych z zajęciem oczu - reguluje wydzielanie gruczołów Meiboma, poprawia jakość łez i stan brzegów powiek

JAK STOSOWAĆ BLEPHACLEAN®?

Chusteczki BLEPHACLEAN® używa się wykonując opisane poniżej, proste czynności:

- na zamknięte powieki i rzęsy nałożyć chusteczkę, delikatnie masować, wykonując okrężne ruchy
- oczyścić brzeg powiek, naciskając delikatnie u nasady rzęs. Używać osobnej chusteczki do każdego oka