

Compeed plastry na odciski na palcach średnie x10 plastrów



Cena: 22,74 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	10 sztuk
Podmiot odpowiedzialny	MagnaPharm
Postać	plaster
Producent	HRA Pharma
Typ produktu	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Technologia hydrokoloidu COMPEED® to aktywny żel wspomagający nawilżanie. Plastry COMPEED® działają jak druga skóra, pomagają utrzymać naturalne nawilżenie skóry, aby:

- chronić przed otarciami i uciskiem;
- przynosić natychmiastową ulgę w bólu i ucisku spowodowanym przez odciski;
- nawilżać i zmiękczać odcisk, pomagając go usunąć.

Pozostają na miejscu przez 24 godziny.

W indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić.

Sposób użycia

1. Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się, czy skóra dotknięta odciskiem nie jest tłusta od kremu czy oliwki.
2. Usuń warstwę papierową, starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej.
3. Nałóż plaster mocno na odcisk, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry.
4. Pozostaw plaster na odcisku aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać. Może pozostawać na miejscu nawet do kilku dni.
5. W celu uzyskania lepszych rezultatów używaj COMPEED® aż do czasu, gdy skóra będzie całkowicie wyleczona.

Na co zwrócić uwagę

- Osoby chore na cukrzycę przed użyciem powinny zasięgnąć porady lekarza.
- Nie stosuj na zainfekowane rany.
- Nie wolno stosować ponownie tego samego plastra (mogłoby to spowodować infekcję).

- Nigdy nie przecinaj plastrów COMPEED®.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.