

Corega MAX OSŁONA Smak Neutralny krem mocujący do protez 40g

Cena: 20,38 PLN



Opis słownikowy

Miejsce stosowania	jama ustna, zęby
Opakowanie	75ml
Podmiot odpowiedzialny	Haleon
Postać	pasta
Typ produktu	wyrób medyczny inny
Wiek	dorośli

Opis produktu

Może się okazać, że podczas adaptacji do protezy zębowej (sztucznych zębów), jedzenie będzie dość utrudnione, ponieważ proteza będzie się przemieszczać. Musi upłynąć trochę czasu zanim człowiek przyzwyczai się do funkcjonowania z protezą. Jednak istnieje sposób aby codzienność stała się łatwiejsza.

To krem mocujący, który sprawi, że proteza będzie przytwierdzona w miejscu, a Ty będziesz mógł jeść bez obaw.

COREGA Max Osłona zapewnia zaawansowaną osłonę blokującą przedostawanie się drobinek jedzenia pod powierzchnię protezy oraz mocując ją na cały dzień. Precyzyjna końcówka pozwala na aplikację odpowiedniej ilości produktu tworząc osłonę dookoła krawędzi protezy.

Sposób użycia:

Konieczne jest dobranie ilości kremu mocującego do potrzeb użytkownika protezy. Krem należy stosować raz dziennie dla mocnego całodziennego trzymania i osłony przed przedostającymi się drobkami jedzenia.

Sposób aplikacji kremu:

1. Protezę umyć i wysuszyć
2. Nanieść krem na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi, w sposób pokazany na rysunku w dołączonej ulotce.
3. Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy
4. Założyć protezę, dociskając ją i przygryźć na kilka sekund dla pewnego mocowania.

Sposób usuwania:

1. Przepłukać jamę ustną wodą
2. Wyjmować protezę powoli jednocześnie nią poruszając
3. Usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki
4. Dokładnie oczyścić protezę stosując tabletki do czyszczenia protez Corega Tabs lub pastę Corega 2w1 do mycia protez zębowych i zębów.

Działania niepożądane:

U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość lub uczulenie na produkt. W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu.

Skład:

Calcium/Sodium PVM/MA Co-polymer, Petrolatum, Cellulose Gum, Paraffinum Liquidum.

Uwagi

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przy prawidłowym stosowaniu produktu może dojść do połknięcia niewielkich ilości kremu; nie jest to szkodliwe.
- Niewłaściwie dopasowane protezy mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Należy kontrolować dopasowanie protez podczas regularnych wizyt u lekarza dentystry.