

Corega POWER MAX Max Czyszczenie tabletki do czyszczenia protez x30 tabletek



Cena: 13,42 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	30 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Haleon
Postać	tabletki musujące
Typ produktu	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Corega Power Max Czyszczenie, tabletki przeciwbakteryjne do czyszczenia protez zębowych 4w1 z aktywnym tlenem

- wyrób medyczny w postaci tabletek do czyszczenia protez zębowych. Produkt pozwala na pozbycie się 99,9% bakterii i wirusów¹, które są najczęstszą przyczyną brzydkiego zapachu z ust. Produkt stosowany ściśle według instrukcji obsługi, pomaga w usunięciu uporczywych przebarwień i w redukcji płytki bakteryjnej. Pozostawia protezę czystą i odświeżoną.

Produkt, dzięki zawartości aktywnego tlenu, pozwala w bezpieczny sposób pozbyć się przebarwień oraz bakterii i wirusów bytujących na protezie.

Ponadto, wyrób Corega Power Max Czyszczenie jest delikatny dla materiału, z którego została ona wykonana. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nieabrazyjnej formuły, która czyści protezę unikając jej rysowania. Tabletki są łatwe w użyciu i docierają nawet w miejsca niedostępne dla szczoteczki, dokładnie je czyszcząc.

Sposób użycia

- Wrzuć tabletkę Corega do pojemnika lub szklanki z taką ilością ciepłej (nie gorącej) wody, aby można było w niej całkowicie zanurzyć protezę zębową.
- Pozostaw protezę zębową w roztworze na 3-5 minut. Dla lepszego rezultatu, po wyjęciu protezy z roztworu, wyczyść ją miękką szczoteczka. Pozostały roztwór niezwłocznie wylej.
- Dokładnie opłucz protezę zębową pod bieżącą wodą.

Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Działa szkodliwie w przypadku połknięcia. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Może powodować reakcję alergiczną. Dokładnie umyć ręce po kontakcie z tabletkami lub roztworem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie przemywać wodą przez kilka minut. W przypadku używania soczewek kontaktowych należy je wyjąć jeśli można to łatwo zrobić. Kontynuować płukanie. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się należy zasięgnąć porady lekarza.
- W przypadku połknięcia: skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

¹ w doświadczeniach laboratoryjnych.