

Emofix maść hemostatyczna 30g

Cena: 35,10 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	30g
Podmiot odpowiedzialny	Vitamed
Postać	maść
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci

Opis produktu

Emofix hemostatyczna maść ochronna na krwawienia z nosa i skóry. Nieinwazyjne i szybkie rozwiązanie terapeutyczne na krwawienia z nosa i z ran skórnych. Pełni funkcję bariery ochronnej oraz wzmacnia działanie naturalnych czynników krzepnięcia krwi.

Dlaczego warto stosować Emofix?

- Szybko hamuje krwawienia z nosa o różnej etiologii m.in.: samoistne i pourazowe spowodowane nieprawidłowościami naczyniowymi, infekcją, stosowaniem preparatów donosowych itp.) oraz skóry
- Przyspiesza regenerację i ułatwia gojenie ran
- Skuteczność hamowania krwawienia potwierdzona klinicznie
- Do stosowania zarówno incydentalnie jak i regularnie
- Dobrze tolerowany w stosowaniu długotrwałym
- Dla dzieci i dorosłych
- Łatwość aplikacji (zawiera dodatkowy aplikator do tamponowania nosa)

Kiedy zalecane jest stosowanie Emofixu?

W celu zapobiegania i powstrzymania epizodów krwawienia ze skóry i błon śluzowych, takich jak:

- krwotok z nosa wywołany samoistnie lub spowodowany urazem
- krwawienia z drobnych ran skórnych

Sposób użycia

- Aby zahamować krwawienie: należy pokryć odpowiednią ilością maści krwawiące miejsce.

- Aby zapobiec nawrotom krwawienia: stosować maść dwa razy dziennie, przez co najmniej dwa tygodnie po ostrym epizodzie krwawienia lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
- W przypadku stosowania na błonę śluzową nosa zaleca się użycie aplikatora dołączonego do opakowania. Po każdym użyciu oczyścić aplikator. Ze względów higienicznych zaleca się używanie aplikatora przez jedną osobę.

Skład

Mieszanka nasyconych kwasów tłuszczowych, wyciąg białkowy z drożdży, fosfatydylocholina, octan tokoferylu, воск pszczeli, olej sojowy, alkohol stearylowy, chlorki wapnia, potasu i magnezu, monostearnian glicerolu, p-hydroksybenzoesan metylu i propylu, BHT.

Środki ostrożności

- W przypadku wystąpienia reakcji niepożądaney należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.
- Pieczenie, swędzenie w nosie i wyciek z nosa mogą pojawić się w pierwszych dniach leczenia i zwykle ustępują w trakcie terapii. Jeśli objawy te utrzymują się, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza.
- Przed zastosowaniem należy upewnić się czy opakowanie nie jest uszkodzone.
- Preparatu nie należy używać po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Termin ważności odnosi się do nieuszkodzonego i prawidłowo przechowywanego produktu.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Po użyciu tubę mocno zakręcić.
- Emofix należy przechowywać w temperaturze pokojowej, nie wyższej niż 30°C. Podczas przechowywania w różnych temperaturach konsystencja maści może się zmieniać, nie powodując pogorszenia jej jakości. Po umieszczeniu w temperaturze pokojowej maść odzyskuje właściwą konsystencję.