

EvoTears Omega krople do oczu 3ml



Cena: 96,98 PLN

Opis słownikowy

Miejsce stosowania	oczy, powieki
Opakowanie	3ml
Podmiot odpowiedzialny	Ursapharm
Postać	krople
Substancja czynna	kwasy Omega-3 (ALA), oktan perfluoroheksylu
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy
Właściwości	produkt wegański / dla wegan

Opis produktu

Kiedy stosujemy EvoTears Omega krople do oczu?

Do Stabilizacji warstwy lipidowej filmu łzowego.

Nawilżanie i ochrona powierzchni oka, łagodzenie objawów występujących przy suchości oczu.

Działanie

EvoTears® OMEGA stabilizuje warstwę lipidową filmu łzowego i zmniejsza parowanie warstwy wodnej filmu łzowego. EvoTears® OMEGA nawilża i chroni powierzchnię oka oraz łagodzi objawy towarzyszące zespołowi suchego oka takie jak pieczenie, swędzenie, kłucie oraz obecność ciała obcego w oku.

Składniki

Sterylna, wolna od faszforanów, krople do oczu bez przeciwbakteryjnych środków konserwujących, zawierające EyeSol® (perfluoroheksylooktan) i 0,2% kwasów tłuszczowych Omega-3.

Stosowanie

Jeśli lekarz lub farmaceuta nie zaleci inaczej, należy zakraplać 1 kroplę preparatu do 4 razy dziennie, kierując ją na dolną powiekę. W związku z tym, że EvoTears®OMEGA nie zawiera konserwantów preparat może być używany codziennie.

Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości preparat EvoTears® OMEGA zachowuje się inaczej niż konwencjonalne krople do oczu. Dlatego należy przed zastosowaniem uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

- Odkręcić zakrętkę z butelki.
- Przed zastosowaniem po raz pierwszy usunąć pierścień plombujący EvoTears® OMEGA.
- Po zdjęciu zakrętki unikać dotykania końcówki zakraplacza do skóry, oka lub rzęs.
- Aby uniknąć niepotrzebnej utraty kropeł proszę uważnie przeczytać punkty 5 i 6, a następnie stosować się do ich treści.
- Skierować otwartą butelkę końcówką zakraplacza do góry i lekko ją ścisnąć.
- Przed zbliżeniem butelki do oka obrócić butelkę ściśniętą między palcami końcówką zakraplacza ku dołowi i natychmiast zwolnić nacisk na butelkę. Spowoduje to przepływ powietrza przez płyn zawarty w butelce. Przytrzymać butelkę w tym położeniu, tj. końcówką zakraplacza skierowaną w dół.
- Lekko odchylić głowę do tyłu oraz ostrożnie i nieznacznie odciągnąć dolną powiekę od oka. W miarę możliwości skierować przy tym wzrok nieco do góry.
- Trzymać obróconą otwartą butelkę pionowo nad okiem. Lekko nacisnąć butelkę i podać po jednej kropli do każdego oka. Uwaga: Ze względu na wyjątkowe cechy produktu EvoTears® OMEGA istnieje możliwość, że nie poczujecie się kropli w oku. W takim przypadku przydatne może być podawanie produktu przed lustrem.
- Dla równomiernego rozprowadzenia EvoTears® OMEGA należy zamknąć oko po podaniu kropli.
- Po zastosowaniu zamknąć butelkę zakrętką.