

Fridababy NoseFrida aspirator do nosa x1 sztuka

Cena: 23,34 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Podmiot odpowiedzialny	ProfiMed
Postać	aspirator
Typ produktu	sprzęt medyczny, wyrób medyczny inny
Wiek	dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Opis produktu

Dzieci mogą odetchnąć ...

szwedzki aspirator do usuwania wydzieliny z nosa podczas infekcji górnych dróg oddechowych

Przeznaczony dla dzieci od pierwszego dnia życia.

GŁĘBOKO OCZYSZCZA NOS

- Niezwykle skuteczny
- Bezpieczny
- Chroni błonę śluzową nosa
- Prosty w obsłudze
- Higieniczny
- Uniwersalny

NoseFrida® pozwoli Tobie i Twojemu dziecku zapomnieć o katarze. Możesz jej używać wielokrotnie, gdy tylko pojawi się potrzeba opróżnienia nosa dziecka z wydzieliny. Miej ją zawsze przy sobie, nawet gdy wyjeżdżasz z dzieckiem na kilka dni. Katar może pojawić się w każdej chwili, jednak z NoseFrida® przestanie być uciążliwy dla Twojego dziecka, a tym samym dla całej rodziny.

Wśród nieocenionych zalet NoseFrida® w szczególności należy wymienić:

- **niezwykłą skuteczność** - przyrząd oczyszcza dokładnie i głęboko przegrody nosowe dając efekt, jakiego nie jest w stanie osiągnąć tradycyjna "gruszka";

- **bezpieczeństwo** - bez względu na siłę ssania opiekuna - usuwa wyłącznie wydzielinę z nosa i nie stwarza zagrożenia dla pacjenta; precyzyjna konstrukcja eliminuje całkowicie ryzyko przeniesienia infekcji z dziecka na opiekuna, co potwierdzają wieloletnie testy kliniczne;
- **ochronę błony śluzowej nosa** - specjalnie wyprofilowana i łagodnie zakończona końcówka Aspiratora nie jest umieszczana wewnątrz nosa dziecka, a jedynie przykładana do otworu nosowego szczelnie go zasłaniając;
- **prostotę obsługi** - przyrząd dzięki swej nieskomplikowanej budowie jest łatwy w obsłudze dla każdego użytkownika;
- **higienę** - zestaw zawiera wymienne filtry higieniczne, natomiast sam Aspirator jest niezwykle prosty do utrzymania w czystości;
- **wszechstronność** - Aspirator może być stosowany zarówno przez członków rodziny, gdzie otoczenie bakteriologiczne jest jednakowe dla wszystkich, jak i profesjonalistów - pielęgniarki i lekarzy w przychodniach i na oddziałach dziecięcych szpitali;
- **uniwersalność NoseFrida®** - sprawdza się doskonale w każdych warunkach, zarówno domowych jak i podczas podróży: Aspirator jest wygodny w użyciu w każdym miejscu i o każdej porze;
- **dostępność** - przyrząd oraz wymienne filtry higieniczne dostępne są w aptekach i sklepach z artykułami dla dzieci.

Wskazówki:

1. Przed użyciem aspiratora NoseFrida wprowadzić roztwór soli fizjologicznej do każdego otworu nosowego, co pomoże w rozrzedzeniu gęstej wydzieliny.
2. Tubę poruszać okrężnymi ruchami w otworze nosowym.
3. Filtr należy wymieniać po każdorazowym użyciu.

Jak czyścić:

Usunąć filtr. Umyć tubę mydłem z wodą. Wężyk osuszyć lub wyczyścić używając kilku kropli alkoholu izopropylowego. Umieścić filtr w otworze zatyczki i założyć na tubę – do usłyszenia „kliknięcia”.

Bezpieczeństwo:

Tuby nie należy wkładać do środka nosa, aby nie zranić dziecka w przypadku gdy się poruszy. Aspiratora NoseFrida używać wyłącznie do czyszczenia nosa – NIE używać do uszu czy gardła. NIE DMUCHAĆ w ustnik gdy tuba jest umieszczona w nosie dziecka. Aspirator NoseFrida NIE jest zabawką – trzymać wszystkich części z dala od dzieci. NIE podłączać aspiratora NoseFrida do mechanicznych przyrządów ssących.

Jak używać:

Aby zapobiec przedostaniu się wydzieliny lub bakterii do wężyka, powinien być założony jednorazowy filtr. Należy przyłożyć końcówkę tuby do nozdrza dziecka tak, aby szczelnie przylegała (nie wkładać do wewnątrz). Wciągać powietrze przez czerwony ustnik, zachowując należyłą ostrożność.

Zestaw składa się z:

- 1 aspirator NoseFrida
- 4 higieniczne filtry
- 1 opakowanie podróżne

Galeria

