

# Granuflex Extra Thin opatrunek hydrokoloidowy 15cm x 15cm x1 sztuka



Cena: 15,90 PLN

## Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Podmiot odpowiedzialny	Convatec
Postać	opatrunek
Typ produktu	wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Charakterystyka:

Granuflex® Extra Thin to samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy. Zapewnia odpowiednie, sprzyjające gojeniu, wilgotne środowisko leczenia ran. Jest półprzezroczysty, co ułatwia jego zakładanie oraz umożliwia obserwację procesu gojenia, ograniczając w ten sposób ilość zmian opatrunku do niezbędnego minimum. Jest cienki, elastyczny i wodoodporny, co bardzo podnosi wygodę jego stosowania. Może być używany na wszystkich partiach ciała, także tych trudnych do opatrzenia. Znacznie ogranicza ryzyko uszkodzeń nowo powstałej tkanki.

### Zastosowanie\*:

#### Jako opatrunek pierwotny:

- Rany przewlekłe płytkie, suche, mało/umiarkowanie sączące (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności żyłnej i tętniczej, odleżyny, zespół stopy cukrzycowej).
- Rany ostre płytkie, suche, mało/umiarkowanie sączące (oparzenia skóry pośredniej grubości (I-II stopień) oraz miejsca pobrania skóry do przeszczepu, otarcia skóry, rany pourazowe, rany po operowaniu chirurgicznym).

#### Jako opatrunek wtórny:

- Może być wykorzystany we wszystkich rodzajach ran, w tym także głębokich, po uprzednim wypełnieniu ich odpowiednio dobranymi opatrunkami pierwotnymi, np.: AQUACEL®, AQUACEL® Ag, Granuflex® Pasta lub GranuGEL®.

- Jako opatrunek wtórny, wraz z odpowiednio dobranym do stanu rany opatrunkiem pierwotnym, może być używany we wszystkich rodzajach ran, w tym także w ranach z martwicą suchą i mokrą.

W przypadku ran zaniedbanych, skolonizowanych przez drobnoustroje, z objawami kolonizacji krytycznej lub infekcji może być stosowany jedynie jako opatrunek wtórny dla opatrunku bakteriobójczego, na przykład AQUACEL® Ag.

### Sposób użycia:

- Oceń stan rany.
- Przepłucz dokładnie intensywnym strumieniem 0,9% NaCl lub Płynem Rignera.
- W przypadku ran podejrzanych o kolonizację bakteryjną zastosuj dodatkowo do przepłukania bezpieczny preparat antyseptyczny.
- W razie konieczności oczyść ranę z tkanek martwiczych.
- Następnie osusz dokładnie skórę wokół rany.
- Zmierz powierzchnię rany.
- Mierz zawsze w miejscu gdzie rana ma największe wymiary.
- Dobierz opatrunek tak, aby był większy od rany. Powinien być zachowany margines minimum 2 cm poza obszarem rany, wówczas opatrunek będzie dobrze przylegał do skóry wokół rany i tworzył zamknięte środowisko gojenia.
- Opatrunek należy nakładać bezpośrednio na oczyszczoną i osuszoną ranę lub używać go, jako opatrunku wtórnego do pokrycia innego opatrunku.

### Zakładanie opatrunku Granuflex® Extra Thin:

- Usuń papier zabezpieczający z warstwy kontaktowej opatrunku, unikając jednocześnie dotykania tej powierzchni.
- Delikatnie i bez naciągania rozwiń opatrunek nad powierzchnią rany.
- Nałóż opatrunek na właściwe miejsce i przytrzymaj przez 30 sekund, aby zapewnić dobre przyleganie.
- Granuflex® Extra Thin powinien być zmieniany w zależności od potrzeb klinicznych, ale może być utrzymywany na ranie nie dłużej niż 7 dni (sygnałem do zmiany opatrunku jest moment, gdy ilość zgromadzonego pod opatrunkiem wysięku będzie większa aniżeli jego możliwości chłonne; pęcherz z wysiękiem/wybrzuszenie zbliży się do brzegów opatrunku lub nastąpi wyciek).

### Usuwanie opatrunku Granuflex® Extra Thin:

- Przyciśnij skórę dłonią i ostrożnie podnieś róg opatrunku.
- Następnie ciągnij w kierunku horyzontalnym - aż do ostatecznego usunięcia (opatrunek będzie się rozciągał).
- W przypadku delikatnej skóry zdejmuj opatrunek stopniowo, od jednego rogu, do całkowitego usunięcia, przy użyciu roztworu soli fizjologicznej lub sterylnej wody wpuszczanego pomiędzy skórą a przywierającą warstwę opatrunku.
- W razie konieczności delikatnie przemyj ranę roztworem soli fizjologicznej lub sterylną wodą w celu usunięcia pozostałego żelu.

\* Zapoznaj się dokładnie ze sposobem użycia na ulotce wewnątrz opakowania.