

Help 4 Skin GOJENIE RAN żel hydrokoloidowy 20g



Cena: 12,39 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	20g
Podmiot odpowiedzialny	Polpharma
Postać	żel
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 2 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Do stosowania w ostrych lub przewlekłych ranach, takich jak:

- Rany (w tym chirurgiczne)
- Odleżyny
- Otwarte owrzodzenia nóg
- Otarcia
- Powierzchnowe oparzenia

Spray pozwala na bezdotykowe nakładanie żelu – wygodne w takich ranach jak np. odleżyny.

Help4Skin Gojenie ran może być również stosowany w przypadku ran i owrzodzeń stóp powstałych w wyniku stanów cukrzycowych. Diabetycy z problemami stóp powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Help4Skin Gojenie ran.

Sposób działania

Help4Skin Gojenie ran zawiera kwasowy karbomer stabilizowany karnozyną, podstawowym peptydem występującym naturalnie w skórze. W przypadku ran suchych takich jak otarcia i rany chirurgiczne ma działanie okluzyjne: hamuje parowanie i zmniejsza utratę płynu przez naskórek. Karnozyna buforuje kwaśne polimery, dzięki czemu działa jako przeciwutleniacz. Karbomer pochłania nadmiar płynu z wilgotnych, sączących się ran oraz schładza i zmiękcza miejsce kontaktu z plastrem i/lub bandażem. Nie przywiera do rany.

Sposób użycia

Dokładnie umyć ręce przed i po użyciu preparatu na ranę.

Zamknięte rany:

- oczyścić i zdezynfekować leczony obszar,
- nałożyć preparat na ranę, nie dotykając rany końcówką aplikatora,
- w razie potrzeby założyć bandaż lub plaster.

Otwarte rany:

- oczyścić i zdezynfekować ranę,
- dokładnie i delikatnie osuszyć sterylną gazą,
- nałożyć grubą warstwę preparatu (0.5-0.75 cm) na ranę, nie dotykając rany końcówką aplikatora,
- założyć plaster lub bandaż,
- zmieniać żel i plaster lub bandaż przynajmniej raz dziennie,
- zmniejszyć ilość stosowanego preparatu, gdy na ranie pojawi się strup.

Uwaga! W przypadku oparzeń - należy najpierw przemyć wodą, następnie przejść do następujących punktów.

Help4Skin Gojenie ran nie jest pierwszym środkiem w przypadku oparzeń! Natychmiast po wystąpieniu oparzenia należy schładzać jego miejsce pod letnią bieżącą wodą przez 20 minut. Należy to zrobić jak najszybciej, gdyż korzystny efekt schładzania oparzonego miejsca zmniejsza się z upływem czasu, a po 30 minutach całkowicie zanika. Aby zapobiec hipotermii, szczególnie w przypadku oparzenia dużej powierzchni ciała, nie zaleca się stosowania zimnej wody. Help4Skin Gojenie ran należy zastosować dopiero w następnej kolejności, po odpowiedniej ocenie stopnia oparzenia. Help4Skin Gojenie ran może być stosowany na powierzchniowe oparzenia naskórka i/lub skóry właściwej, zwykle charakteryzujące się obrzękiem, zaczerwienioną skórą i pęcherzami.

Skład

Kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu.

Środki ostrożności:

- Nie używać w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników. - W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano wystąpienie podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie.
- Nie stosować Help4Skin Gojenie ran na twarz, oczy, powieki oraz błony śluzowe.
- Należy zawsze zasięgnąć porady lekarza:
 - w przypadku dużych, obszernych lub bardzo głębokich ran,
 - w przypadku silnie zakażonych ran,
 - w przypadku wolnego gojenia się rany lub ryzyka powikłań.
- W takich przypadkach Help4Skin Gojenie ran może być pomocny, ale w żadnym wypadku nie wystarcza jako jedyny środek leczniczy.
- Do użytku zewnętrznego.
- Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności (podanego na opakowaniu).