

# IRIGASIN zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok x30 saszetek



Cena: 18,85 PLN

## Opis słownikowy

Opakowanie	30 saszetek
Podmiot odpowiedzialny	Aflofarm
Postać	proszek do przygotowania roztworu
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 4 roku życia

## Opis produktu

Irigasin to wyrób medyczny przeznaczony do przygotowania roztworu do płukania nosa i zatok. Irigasin umożliwia przygotowanie zarówno roztworu izotonicznego, jak i hipertonicznego, w zależności od potrzeb pacjenta.

### Wskazania:

Izotoniczny roztwór chlorku sodu oczyszcza jamy nosa z zalegającej wydzieliny, bakterii, wirusów i alergenów, a także pielęgnuje nos i zatoki w przypadku:

- ostrego lub przewlekłego zapalenia zatok przynosowych,
- nieżyty nosa w przebiegu infekcji lub alergii,
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok,
- po ekspozycji na wysokie stężenie pyłu w powietrzu,
- profilaktycznie dla utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok.

Dodatkową zaletą roztworu izotonicznego jest działanie nawilżające na śluzówkę nosa wysuszoną w wyniku długotrwałego stosowania leków do nosa lub w następstwie przebywania w klimatyzowanych lub nadmiernie ogrzewanych pomieszczeniach.

Hipertoniczny roztwór chlorku sodu, poza działaniem oczyszczającym, ze względu na większe stężenie substancji czynnej, wykazuje właściwości osmotyczne, dzięki którym zmniejsza obrzęk śluzówki. Jest więc zalecany w przypadku obrzęku nosa towarzyszącego nieżytowi nosa w trakcie infekcji lub alergii (katar sienny), a także zapalenia zatok.

### Sposób postępowania z wyrobem:

Dorośli i dzieci powyżej 4 roku życia:

- Płukanie nosa i zatok należy wykonywać 1-2 razy dziennie lub według zaleceń lekarza.
- Dzieci mogą stosować wyrób jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.
- Przed zastosowaniem wyrobu u dzieci poniżej 4 roku życia, należy skonsultować się z lekarzem.
- W celu przygotowania roztworu izotonicznego do butelki należy wsypać 1 saszetkę proszku, a następnie uzupełnić ją do zaznaczonej linii (240 ml) przegotowaną, ostudzoną wodą.
- W celu przygotowania roztworu hipertonicznego do butelki należy wsypać 2 saszetki proszku, a następnie uzupełnić ją do zaznaczonej linii (240 ml) przegotowaną, ostudzoną wodą.
- Do płukania należy używać wyłącznie butelki dołączonej do opakowania. Nie stosować w przypadku uszkodzenia butelki.
- Do każdego płukania należy przygotować świeży roztwór.
- Wyrób może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz w trakcie karmienia piersią. Wyrób nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.