


# Jasnum sensi żel 50ml

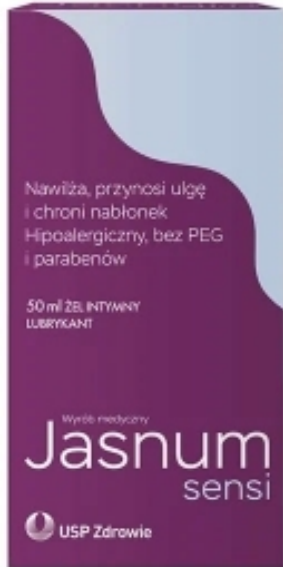

Cena: 40,86 PLN

## Opis słownikowy

Opakowanie	50ml
Podmiot odpowiedzialny	USP Zdrowie
Postać	żel
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

### Jasnum sensi, żel intymny – ulga i nawilżenie

Lubrykant wodny Jasnum sensi to specjalistyczny, wysokiej jakości żel intymny, zapewniający dodatkowe nawilżenie okolic intymnych podczas stosunków płciowych i badań ginekologicznych. Nawilża, łagodzi i chroni nabłonek! Nie brudzi bielizny.

### Mechanizm działania wyrobu

Po aplikacji wyrobu Jasnum Sensi na zewnętrzną powierzchnię narządów płciowych, w trakcie stosunku płciowego lub wykonywania badań ginekologicznych, następuje wytworzenie nawilżającej powłoki ochronnej, utrzymującej się w miejscu aplikacji, co znacznie redukuje tarcie i wpływa na zmniejszenie bólu i ochronę nabłonka w przypadku suchości błony śluzowej. Zastosowanie lubrykantu wpływa na ochronę błony śluzowej podczas stosunku oraz wykonywania badań ginekologicznych poprzez wspieranie naturalnego nawilżenia, co pozwala uniknąć mechanicznych mikrouszkodzeń, otarć i podrażnień naskórka oraz śluzówki.

### Sposób użycia

- Uwaga: Przed aplikacją żelu dokładnie umyć ręce.
- Żel można stosować w ilości zależnej od potrzeb, kilka razy dziennie, regularnie, bez ograniczeń wiekowych. Produkt należy nałożyć na miejsce narażone na otarcia, przed stosunkiem lub badaniem. Wyrób można stosować w kontakcie z prezerwatywami lateksowymi, poliuretanowymi i poliizoprenowymi.
- Żel można aplikować bezpośrednio na prezerwatywę.
- Uwaga! Wyrób medyczny Jasnum Sensi nie jest środkiem antykoncepcyjnym i nie zawiera środków przeciwdrobnoustrojowych.

## Skład

Glicerol, kwas cytrynowy, hydroksyetyloceluloza, fenyletanol, glikol kaprylowy, woda oczyszczona.

## Ostrzeżenia i przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Jeżeli w trakcie użycia żelu pojawia się uczucie pieczenia, świąd lub zaczerwienienie, należy zaprzestać stosowania wyrobu i w przypadku braku ustąpienia objawów skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- W ciąży oraz w okresie karmienia stosować po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
- Żel może wpływać na ruchliwość plemników i zmniejszać zdolność do zajścia w ciążę.
- W przypadku utrzymującej się suchości pochwy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie stosować w czasie menstruacji.
- Należy unikać przypadkowego kontaktu żelu ze śluzówką oka.
- Nie stosować ze środkami znieczulającymi miejscowo i innymi preparatami dopochwowymi, gdyż wyrób może zmniejszać lub opóźniać ich działanie.
- Nie stosować w przypadku upływu terminu ważności.
- Wyrób do stosowania na okolice intymne. Nie połykać!