

Maseczka ochronna wielowarstwowa FFP2 x2 sztuki

Cena: 3,10 PLN



Opis słownikowy

| | |
|--------------|--------------------|
| Opakowanie | 2 sztuki |
| Postać | maska ochronna |
| Typ produktu | środek higieniczny |

Opis produktu

Półmaski filtrujące są kompletnym sprzętem ochrony dróg oddechowych, składającym się całkowicie z materiału filtrującego - polipropylenu. Standard bezpieczeństwa to KN95, a skuteczność filtracji wynosi $\geq 95\%$. Przeznaczone do ochrony układu oddechowego przed nietrującymi ciekłymi i stałymi cząstkami tj. smog, pyły, aerozole itp. Współczynnik filtrowania cząstek stałych: PM 2,5.

Maski są wygodne i dopasowują się do twarzy. Posiadają autentyczną deklarację zgodności CE i spełniają europejską normę EN149:2001+A1:2009.

SPECYFIKACJA

- Wysoka jakość wykonania i lekka konstrukcja
- Standard KN95
- Skuteczność filtracji $\geq 95\%$
- Pięć warstw
- Zgodność z europejskimi normami
- Element usztywniający noskę wszyty między warstwy maseczki

Dzięki odpowiedniemu kształtowi maseczki maska zapewnia idealne dopasowanie niezależnie od kształtu i wielkości twarzy użytkownika. Z obu stron mocowana za pomocą delikatnych gumek. Maskę posiada metalowy klips, dzięki któremu możemy idealnie dopasować ją do twarzy, zapewniając tym samym bardzo dobrą szczelność. Maskę posiada bardzo wysoki poziom filtracji 95%

SKŁAD

- włóknina 56%

- materiał meltblown 26%
- bawełna 18%

PRAWIDŁOWE ZAKŁADANIE MASKI

- Przed założeniem maski dokładnie umyj oraz odkaż ręce.
- Umieść maskę na twarzy klipssem do góry.
- Trzymając jednocześnie za obie gumki, załóż je za uszy.
- Użyj obu rąk do zaciskania klipsa na nosie wokół mostka nosowego, aby upewnić się, że jest on dobrze dopasowany. Regulacja zaczepu nosowego jedną ręką może zmniejszyć skuteczność ochrony dróg oddechowych.
- Po założeniu należy sprawdzić przyleganie oraz szczelność maski.

Galeria

