

Mucovagin żel 25g

Cena: 35,58 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	25g
Podmiot odpowiedzialny	Verco
Postać	żel
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Jesteś w ciąży lub po porodzie? Czujesz dyskomfort podczas stosunku? Dokuczają Ci dolegliwości zewnętrznych okolic intymnych?

Mucovagin żel to preparat posiadający w swoim składzie formułę drobnocząsteczkowego kwasu hialuronowego, opracowany z myślą o milionach kobiet, które cierpią z powodu suchości okolic intymnych oraz potrzebują produktu wspomagającego procesy regeneracji. Działa długotrwale nawilżająco oraz wspiera procesy regeneracji i gojenia okolic intymnych. Wspomaga pielęgnację ran po porodzie naturalnym.

Kiedy stosować Mucovagin żel?

- W ciąży do masażu krocza
- Po porodzie naturalnym
- Jako wsparcie w regeneracji błony śluzowej pochwy oraz zewnętrznych okolic intymnych
- Jako długotrwale nawilżający żel, ułatwiający kontakty intymne
- Jeśli stosowanie Mucovagin globulki nie jest komfortowe

Skuteczne działanie kwasu hialuronowego

Kwas hialuronowy, główny składnik tego produktu, jest naturalnym składnikiem budulcowym ludzkiego organizmu. Kwas hialuronowy wiąże wodę, dzięki czemu tworzy wiskoelastyczną warstwę ochronną na powierzchni błony śluzowej pochwy. Tworzy on zatem powłokę ochronną na błonie śluzowej i wspomaga przywrócenie naturalnego nawilżenia. W ten sposób może mieć on duży wpływ na elastyczność tkanek i wspomagać naturalny proces gojenia.

Poznaj zalety Mucovagin żel

- Nie zawiera hormonów, parabenów, olejków i wyciągów roślinnych oraz środków zapachowych
- Zapewnia długotrwałe nawilżenie i skuteczność w regeneracji dzięki formule drobnocząsteczkowego kwasu HA
- Bezpieczny dla prezerwatyw, nie wpływa negatywnie na prezerwatywy lateksowe i nielateksowe

Jak stosować Mucovagin żel?

Mucovagin żel należy używać wewnętrznie, miejscowo do pochwy lub zewnętrznie na okolice narządów płciowych. Przed użyciem i po użyciu żelu należy dokładnie umyć ręce.

Wewnętrznie:

- Mucovagin żel należy aplikować wewnętrznie, w pozycji leżącej, za pomocą aplikatora dołączonego do opakowania, pozwalającego na zastosowanie odpowiedniej ilości żelu.

Zewnętrznie:

- Nanieść niewielką ilość produktu (zawartość aplikatora) na okolice zewnętrznych narządów płciowych.