

Opaska elastyczna stawu kolanowego PANI TERESA rozmiar L x1 sztuka



Cena: 24,17 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Podmiot odpowiedzialny	Sigvaris
Postać	opaska
Typ produktu	wyrób medyczny inny

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- w przewlekłych zmianach zwyrodnieniowo - reumatycznych stawu kolanowego
- po zdjęciu opatrunków gipsowych – wzmacnia i stabilizuje kolano
- przed i po operacjach uszkodzonych łąkotek
- w przypadkach zwichnięć lub obrażeń kolana
- zapobiega obrzękom, łagodzi bóle
- wspomaga aparat więzadłowy stawu przy wysiłku fizycznym

Tabela rozmiarów

Rozmiar S:

- Obwód nogi nad kolaniem: 30 - 38 cm

Rozmiar M:

- Obwód nogi nad kolaniem: 39 - 47 cm

Rozmiar L:

- Obwód nogi nad kolanem: 48 - 54 cm

Rozmiar XL:

- Obwód nogi nad kolanem: 55 - 63 cm

Rozmiar XXL:

- Obwód nogi nad kolanem: > 63 cm

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

- W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad kolanem, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

- Opaskę naciągnąć od dołu na wysokość stawu kolanowego.
- Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

Przechowywanie:

- W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

- Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

- Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.

SKŁAD SUROWCOWY:

Poliester 56% Bawełna 35% Elastan 9%

GWARANCJA:

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Galeria

