

Opaska elastyczna stawu nadgarstkowego - długa - PANI TERESA rozmiar S x1 sztuka



Cena: 19,82 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Podmiot odpowiedzialny	Sigvaris
Postać	opaska
Typ produktu	wyrób medyczny inny

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- w przewlekłych zmianach zwyrodnieniowo – reumatycznych stawu nadgarstkowego
- wspomaga leczenie zapalenia ścięgien, a także po operacji rekonstrukcji ścięgien
- jako opatrunek po zdjęciu gipsu – działa przeciwbólowo zwłaszcza w okresie rehabilitacji
- łagodzi ból, przekrwienie i upośledzenie funkcji ręki
- zapobiega i zwalcza pourazowe obrzęki nadgarstka

Tabela rozmiarów

Rozmiar XS:

- Obwód ręki w nadgarstku: < 14 cm

Rozmiar S:

- Obwód ręki w nadgarstku: 14 - 18 cm

Rozmiar M:

- Obwód ręki w nadgarstku: 19 - 22 cm

Rozmiar L:

- Obwód ręki w nadgarstku: 23 - 25 cm

Rozmiar XL:

- Obwód ręki w nadgarstku: > 25 cm

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

- W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu ręki w nadgarstku, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

- Opaskę naciągnąć na wysokość stawu nadgarstka tak, aby kciuk umieszczony został w mniejszym otworze. Nosić szwami na zewnątrz.
- Nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę.

Przechowywanie:

- W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

- Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

- Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.

SKŁAD SUROWCOWY:

Poliester 56% Bawełna 35% Elastan 9%

GWARANCJA:

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Galeria

