

# Opaska elastyczna stawu skokowego - skarpetka bezszwowa - PANI TERESA rozmiar M x1 sztuka



Cena: 30,31 PLN

## Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Podmiot odpowiedzialny	Sigvaris
Postać	opaska
Typ produktu	wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- wczesna rehabilitacja stawów po złamaniach, operacjach i urazach
- wzmacnianie i ochrona stawów
- po zdjęciu opatrunków gipsowych
- wzmacnia aparat więzadłowy stawu przy wysiłku fizycznym

### Tabela rozmiarów

Rozmiar S:

- Obwód nogi nad kostką: 19 - 21 cm

Rozmiar M:

- Obwód nogi nad kostką: 22 - 24 cm

Rozmiar L:

- Obwód nogi nad kostką: 25 - 26 cm

Rozmiar XL:

- Obwód nogi nad kostką: 27 - 28 cm

### Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

- W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad kostką, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

- Część dzianą wyrobu – skarpetkową – wciągnąć na nogę tak, aby węższy ściągacz przypadła na śródstopie, a szerszy ściągacz powyżej kostki. Następnie odpiąć rzepy na taśmie dociągającej i nałożyć ją na nogę – krzyżując na przegubie (według rysunku), zapiąć na rzep regulując ucisk.

Przechowywanie:

- W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

- Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

- Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.
- W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.
- Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.
- Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.

### SKŁAD SUROWCOWY:

Poliamid 70%, Elastan 14%, Poliester 14%, Silikon 2%

### GWARANCJA:

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

### KOLOR:

Cielisty

## Galeria

---

