

## Plastry SALVEQUICK MED Corn na odciski x6 sztuk

Cena: 7,16 PLN



### Opis słownikowy

Opakowanie	6 sztuk
Podmiot odpowiedzialny	Orkla Care
Postać	plaster
Substancja czynna	kwas salicylowy
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy
Wiek	dorośli

### Opis produktu

#### Dlaczego warto kupić plastry Salvequick na odciski z kwasem salicylowym?

- pomagają usunąć odcisk już po 4 dniach
- redukują ból
- jeden plaster zawiera 40 mg (40%) kwasu salicylowego, który uwalnia się wyjątkowo efektywnie

Plaster ochronny z perforowanym opatrunkiem, który pomaga zmniejszyć ucisk i tym samym łagodzi ból. Plaster zawiera kwas salicylowy (40%), który pomaga usunąć odcisk i zrogowacenia skóry. Skóra składa się z kilku warstw. Najbardziej zewnętrzna warstwa, czyli naskórek, stale się odtwarza. Jej główną funkcją jest działanie jako bariera dla ochrony głębszych warstw skóry. Odciski i/lub zrogowacenia mogą powstawać w wyniku reakcji na powtarzający się ucisk lub tarcie (np. w wyniku noszenia niedopasowanego obuwia).

#### INSTRUKCJA STOSOWANIA:

- Należy upewnić się, że skóra jest czysta i sucha.
- Rozpakować plaster i umieścić na odcisku.
- Upewnić się, że okrąg w centrum plastra znajduje się bezpośrednio na odcisku lub zrogowaceniu.
- Plaster należy zmieniać codziennie. Po czterech dniach rdzeń odcisku będzie można usunąć poprzez namoczenie stopy w gorącej wodzie z dodatkiem soli lub mydła.
- W razie potrzeby czynność powtórzyć.
- Nie stosować zbyt często.

## PROFILAKTYKA:

Aby zapobiec ponownemu utworzeniu się odcisku lub zrogowacenia, należy chronić narażony obszar skóry przed nadmiernym uciskiem lub tarciem. Zaleca się stosowanie samoprzylepnych krążków ochronnych na odciski i zrogowacenia skóry. Należy nosić dobrze dopasowane i wygodne obuwie.

## OSTRZEŻENIA:

- W przypadku wystąpienia podrażnienia (np. zaczerwienienia, pieczenia) należy usunąć plaster i zaprzestać jego stosowania.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na kwas salicylowy/salicylany.
- Nie należy używać na rany, podrażnioną, uszkodzoną skórę, w miejscu zainfekowanym lub zaczerwienionym.
- Osoby chorujące na cukrzycę, ze słabym krążeniem lub zaburzeniami czynności nerek powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem plastra.
- Nie dopuszczać do kontaktu plastra z błonami śluzowymi, a w szczególności z oczami.
- Kwas salicylowy może zwiększyć przepuszczalność skóry, co należy brać pod uwagę w przypadku stosowania leków o działaniu miejscowym.
- Należy zminimalizować styczność ze zdrową skórą wokół odcisku, by zapobiec podrażnieniom.
- Plaster nie może być stosowany przez dzieci i kobiety w ciąży bez zalecenia lekarza.
- Plaster może być używany tylko przez jedną osobę. Ponowne użycie tego samego plastra zwiększa ryzyko infekcji.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie połykać.
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

## Skład:

Folia polietylenowa, klej akrylowy, kwas salicylowy i azorubina.