

Plastry SALVEQUICK MED Wart Plaster na kurzajki x20 sztuk

Cena: 20,71 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	20 sztuk
Podmiot odpowiedzialny	Orkla Care
Postać	plaster
Substancja czynna	kwas salicylowy
Typ produktu	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wart Plaster to plaster z kwasem salicylowym, który pomaga usunąć kurzajki na podeszwię stopy. Ta metoda leczenia kurzajek jest zarówno skuteczna, jak i bezbolesna: kwas salicylowy umieszczony wewnątrz plastra uszkodza komórki skóry na kurzajce bez oddziaływania na skórę wokół. Jeśli masz kurzajkę na podeszwię stopy, możesz użyć ochronnego plastra na kurzajki w celu jej usunięcia, jednocześnie zapobiegając rozprzestrzenianiu się infekcji. Opakowanie zawiera 20 plastrów na kurzajki. Im wcześniej rozpoczniesz leczenie, tym szybciej pozbędziesz się kurzajki.

Jak stosować

1. Przed aplikacją namoczyć kurzajkę w ciepłej wodzie przez 5 minut.
2. Oczyszczyć i osuszyć skórę, upewniając się, że miejsce aplikacji plastra nie jest natłuszczone kremem ani olejkami.
3. Usunąć papier zabezpieczający, unikając dotykania strony adhezyjnej plastra.
4. Nałożyć plaster z opatrunkiem z kwasem salicylowym bezpośrednio na kurzajkę, tak aby jego centralna część znajdowała się na kurzajce, upewniając się, że krawędzie plastra dobrze przylegają do skóry.
5. Pozostawić na miejscu, aż plaster zacznie odstawać. Po maksymalnie 48 godzinach należy usunąć plaster.
6. Przed usunięciem kurzajki namoczyć zmieniony obszar skóry w ciepłej wodzie przez 5 minut.
7. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Nie stosować dłużej niż 14 dni.

Uwaga!

Użycie plastra u dziecka lub przez kobietę w ciąży wymaga konsultacji z lekarzem. Plastrów nie powinny stosować osoby chore na cukrzycę, osoby z nadwrażliwością na kwas salicylowy oraz osoby ze słabym krążeniem krwi.