

Softeye Blepha chusteczki okulistyczne x14 sztuk

Cena: 28,18 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	14 sztuk
Podmiot odpowiedzialny	Polpharma
Postać	chusteczki
Typ produktu	wyrób medyczny inny

Opis produktu

CHUSTECZKI OKULISTYCZNE DO CODZIENNEJ HIGIENY POWIEK DLA OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI SOFTEYE BLEPHA to jednorazowe chusteczki z naturalnej bawełny, nasączone roztworem zawierającym Hy-Ter® (hialuronian sodu i naturalny ekstrakt z drzewa herbacianego) i aloe - o działaniu oczyszczającym, zmiękczającym, kojącym i udrażniającym.

Formuła SOFTEYE BLEPHA opiera się na naturalnych składnikach przeciwzapalnych i odkażających, dzięki czemu produkt ten przynosi szybką ulgę. Właściwa higiena powiek jest kluczowa w przypadku potencjalnego i trwającego stanu zapalnego i infekcji.

Dzięki zastosowaniu formuły Hy-Ter® wyrób medyczny SOFTEYE BLEPHA jest wskazany do higieny powiek i rzęs, a także pomocniczo:

- jako środek odkażający przed i po zabiegach chirurgicznych,
- w leczeniu bakteryjnego i alergicznego zapalenia spojówek,
- w zapaleniu powiek i spojówek.

STOSOWANIE

1. Umyj dokładnie ręce. Otwórz saszetkę korzystając z nacięcia i wyjmij chusteczkę.
2. Rozłóż chusteczkę i delikatnie oczyść powieki i rzęsy w kierunku od wewnętrznego kącika oka do zewnętrznego, cały czas trzymając oko zamknięte.
3. Powtarzaj czynność przez kilka minut, aby usunąć wydzielinę z oka lub inne pozostałości (smog, kurz, puder itp.). Niektórzy pacjenci odczuwają lekkie, szybko przemijające uczucie pieczenia w trakcie stosowania wyrobu lub tuż po zakończeniu.

Używaj jednej chusteczki na jedno oko. Po użyciu umyj ręce.
Nie przemywaj oka po zastosowaniu produktu.

CIĘPŁY KOMPRES: aby produkt skuteczniej usunął wydzielinę z oka, zanurz zamkniętą saszetkę z chusteczką w ciepłej wodzie (o temperaturze nieprzekraczającej 45 °C) na dziesięć minut. Po ogrzaniu chusteczka musi być natychmiast wykorzystana jako kompres.

ZIMNY KOMPRES: aby wzmocnić uczucie ulgi dla oka, szczególnie w przypadku zaczerwienienia lub obrzęku powiek, należy schłodzić zamkniętą saszetkę w niskiej temperaturze (nie niższej niż 5) przez dziesięć minut.

DODATKOWE INFORMACJE

- Do użytku zewnętrznego: do stosowania wyłącznie w okolicach oka, przy zamkniętych oczach.
- Nie stosować produktu w przypadku zdiagnozowanej nadwrażliwości na dowolny jego składnik.
- W razie utrzymującego się uczucia pieczenia należy przerwać stosowanie.
- Każda saszetka jest przeznaczona do jednorazowego użytku, należy otworzyć ją bezpośrednio przed zastosowaniem.
- Nie stosować ponownie częściowo zużytej chusteczki, aby uniknąć zanieczyszczenia produktu i osłabienia jego skuteczności.
- Nie stosować, gdy saszetka jest niedomknięta i/lub opakowanie jest uszkodzone.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produktu nie należy połykać.