

Sutricon plastry silikonowe na blizny 5x30cm x5 sztuk

Cena: 121,78 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	5 sztuk
Podmiot odpowiedzialny	Verco
Postać	plaster
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 6 miesiąca życia

Opis produktu

Działanie:

Silikonowe plastry Sutricon® poprawiają wygląd i elastyczność blizn – rozjaśniają, wygładzają i zmniejszą ich widoczność. Dzięki swoim właściwościom zapewniają odpowiedni poziom wilgotności tkanki bliznowatej. Niwelują również dyskomfort związany z tworzącą się blizną, taki jak ból, swędzenie czy uczucie ciągnięcia.

Wskazania:

- blizn pooperacyjnych
- blizn poparzeniowych
- blizn pourazowych
- w zapobieganiu nieprawidłowemu bliznowaceniu
- dla dzieci (już od 6. miesiąca życia) i dorosłych
- w zmniejszeniu widoczności blizn świeżych i dojrzałych (nawet do 9 lat)

Zalety produktu:

- Łatwo dostosowują się do powierzchni skóry,
- Aplikacja 1 dziennie i aktywne działanie przez 24 godziny,
- Zabezpieczają przed powstawaniem blizn przerostowych i keloidów,
- Zmniejszają widoczność blizny – rozjaśniają ją i wygładzają,
- Zmniejszają napięcie oraz uczucie ciągnięcia i swędzenia,
- Plastry silikonowe posiadają rekomendację Międzynarodowego Zespołu Ekspertów ds. Leczenia Blizn1

- Są ultracienkie (0,25 mm) oraz przezroczyste, dzięki czemu są prawie niewidoczne na skórze.

Składniki:

Żel silikonowy, elastyczna membrana poliuretanowa.

Sposób użycia i zawartość opakowania:

- Po całkowitym zagojeniu rany (kiedy zejdą wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka) można zastosować silikonowe plastry Sutricon na blizny.
- W przypadku zastosowania plastra na bliznę znajdującą się w miejscu narażoną na rozciągnięcie (np. staw kolanowy, staw łokciowy) tak jak w przypadku innych produktów w postaci plastra, może nastąpić jego odklejenie i przemieszczenie.
- Przed użyciem należy dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę. Plaster należy dociąć do wielkości blizny, zostawiając margines 5 mm z każdej strony i nakleić na bliznę. 1 plaster = 3 - 5 dni stosowania. Raz na dobę należy zdjąć plaster, umyć bliznę, osuszyć i nałożyć ponownie ten sam plaster.
- Długość terapii to średnio:
 - min. 3 miesiące w przypadku blizn świeżych
 - min. 6 miesięcy w przypadku blizn starszych

Środki ostrożności:

Plastry Sutricon nie mogą być stosowane na:

- Rany otwarte
- Rany sączące
- Oparzenia
- Błony śluzowe