

Sutricon silikonowy żel na blizny 15ml

Cena: 34,16 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	15ml
Podmiot odpowiedzialny	Verco
Postać	żel
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 1 roku życia

Opis produktu

Działanie:

Regularne stosowanie żelu silikonowego Sutricon® poprawia wygląd blizny, zmniejsza ją i rozjaśnia. Żel szybko wysycha, tworząc na powierzchni skóry elastyczną, niewidoczną powłokę utrzymującą odpowiedni stopień nawilżenia skóry i chroniącą bliznę przed czynnikami zewnętrznymi. Może być stosowany w celu wspomagania leczenia blizn przerostowych i keloidów. Łagodzi objawy związane z posiadaniem blizny takie jak świąd czy uczucie ciągnięcia.

Wskazania:

Sutricon żel przeznaczony do codziennej pielęgnacji blizn:

- Zlokalizowanych na odkrytych i ruchomych powierzchniach ciała i twarzy,
- O długości do 10 cm,
- Po liftingu twarzy i szyi,
- Po korekcie powiek,
- Po zabiegach chirurgicznych w okolicach ust (np. lip lift),
- Po mniejszych oparzeniach i przerwaniu ciągłości skóry na ruchomych partiach ciała,
- Po przeszczepie skóry w okolicy twarzy,
- Zlokalizowane w obrębie stawów i zgięć kończyn górnych i dolnych,
- Przerostowe i bliznowce.

Zalety produktu:

- Zmniejsza widoczność blizn i wyrównuje jej koloryt.
- Zapewnia matowe wykończenie bez efektu świeżącego filmu (non-oily).
- Żel o lekkiej, niewodnistej konsystencji.
- Efekt szybkiego wysychania na powierzchni skóry – może być stosowany pod makijaż.
- Może być łączony z innymi metodami terapeutycznymi, np. masażem blizny.
- Może być stosowany u dzieci powyżej 1. roku życia.

Składniki:

- polisiloksany, dwutlenek krzemu

Sposób użycia i zawartość opakowania:

Po całkowitym zagojeniu rany (kiedy zejda wszystkie strupy i pojawi się nowa tkanka) można rozpocząć stosowanie żelu Sutricon. Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny nanieś niewielką ilość preparatu i masuj ją kolistymi ruchami przez około 2-3 min. Rozcieraj bliznę, lekko uciskając ją opuszkami palców. Zaleca się stosowanie żelu minimum dwa razy dziennie. Długość stosowania jest indywidualna i zależy od wielu czynników, m.in. wieku blizny, uwarunkowań genetycznych oraz od jej rodzaju:

- minimum 3 miesiącach w przypadku świeżych blizn
- w przypadku starszych blizn na efekty należy poczekać dłużej, nawet do 6 miesięcy