

## SutriSept płyn na rany i oparzenia 250ml



Cena: 45,05 PLN

### Opis słownikowy

Opakowanie	250ml
Podmiot odpowiedzialny	Verco
Postać	aerazol
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

SutriSept® w Solution Płyn na rany to nowej generacji preparat do antyseptycznego oczyszczania, przemywania ran i oparzeń 1. i 2. stopnia. SutriSept® bezboleśnie oczyszcza rany i oparzenia, zapobiega zakażeniu rany i przyspiesza jej gojenie. Przeznaczony jest do oczyszczania oraz nawilżania ran zakażonych i niezakażonych. Zawiera jedyne na rynku połączenie 0,1% PHMB (Poliheksanid) i Poloksameru 188, niejonowego surfaktantu wspierającego leczenie ran<sup>1</sup>.

Jest on także odpowiedni do antyseptycznego oczyszczania, zmiękczenia i usuwania wyschniętych i przywierających do rany materiałów opatrunkowych, bez powodowania wtórnego urazu.

**Zgodnie z najnowszymi (z 2020 roku) wytycznymi ekspertów SutriSept® rekomendowany jest jako pierwszy wybór w <sup>2</sup> <sup>3</sup>:**

- Odkażaniu ran
- Oparzeniach
- Ranach zainfekowanych
- Ranach z biofilmem

### Działanie

SutriSept® w Solution Płyn oczyszcza rany mechanicznie. Wchodzące w skład wyrobu środki powierzchniowo czynne, poprzez obniżenie napięcia powierzchniowego, zapewniają wygodne i bezbolesne oczyszczanie rany. SutriSept® w Solution Płyn przyczynia się do gojenia rany zapewniając wysoce pozytywne działania oczyszczające i nawilżające na powierzchniach, na których jest aplikowany.

### Wskazania:

SutriSept Płyn na rany jest odpowiedni do stosowania w poniższych wskazaniach:

- Zakażone i niezakażone rany ostre (np. rany urazowe powstałe w wyniku przecięcia, rozdarcia, otarcia, zmiżdżenia, ugryzienia, użądlenia itp., rany chirurgiczne),
- Zakażone i niezakażone rany przewlekłe (np. owrzodzenia stopy cukrzycowej, owrzodzenia żyłne, odleżyny itp.),
- Zakażone i niezakażone rany powstałe w wyniku działania czynników termicznych lub chemicznych (np. oparzenia 1. i 2. stopnia, oparzenia chemiczne itp.),
- Rany spowodowane działaniem prądu elektrycznego,
- Rany popromienne,
- Miejsca wprowadzenia cewników urologicznych,
- Pielęgnacja skóry w okolicy stomii, pielęgnacja przetok i ropni.

SutriSept Płyn na rany odpowiedni także:

- Do oczyszczania i pielęgnacji powierzchni rany przed założeniem opatrunku.
- Do antyseptycznego oczyszczania, zmiękczenia i usuwania wyschniętych, zanieczyszczonych i przywierających do rany materiałów opatrunkowych, tj. bandaży, opatrunków, gazików i wypełniaczy ran.

### Zalety produktu:

- Pierwszy wybór na rany i oparzenia<sup>2</sup>
- Zapobiega zakażeniu rany i przyspiesza jej gojenie
- Bezboleśnie oczyszcza i nawilża ranę
- Nie szczypie, nie boli – nie zawiera alkoholu
- Szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego
- Bezpieczeństwo długotrwałego stosowania
- Wygodny w użyciu atomizer rozpylający

### Składniki:

Jedyne połączenie takich substancji jak:

- 0,1% PHMB (Poliheksanid), Poloksamer 188 1%
- PHMB – nowoczesna substancja antyseptyczna o szerokim spektrum działania
- Poloksamer 188 – niejonowy surfaktant wspierający leczenie ran

### Sposób użycia i zawartość opakowania:

Przed założeniem opatrunku:

- Krok 1
  - Całą ranę jak i jej okolice należy oczyścić SutriSept® Płyn na rany.
- Krok 2
  - Rany z głęboką i rozległą tkanką martwiczą należy przemywać przez 10 do 15 minut za pomocą w pełni namoczonego kompresu (przez założenie mokrego opatrunku).
- Krok 3
  - Aplikację należy powtarzać w zależności od stanu rany, bez żadnych ograniczeń czasowych.
- Krok 4
  - Płynu nie należy rozcieńczać! Na oczyszczoną ranę można zastosować wyrób medyczny SutriSept® w Gel Hydrożel na rany.
- Krok 5
  - Odpowiednio zabandażować ranę.

Po założeniu opatrunku:

- Krok 1
  - Dokładnie namoczyć opatrunki i bandaże przywierające do powierzchni rany stosując SutriSept® w Solution Płyn na rany, odczekać ok. 5-10 minut, aż zmiękną, po czym ostrożnie usunąć je z rany.
- Krok 2
  - Namoczenie materiałów opatrunkowych płynem SutriSept® w Solution zapobiega ich przywieraniu do powierzchni rany i znacznie ułatwia zmianę opatrunku.
- Krok 3
  - SutriSept® w Solution Płyn na rany wykazują kompatybilność ze wszystkimi opatrunkami na rany.

W przypadku ran głębszych i większych, powierzchnię rany najpierw przemywa się produktem SutriSept® w Solution Płyn na rany, a następnie wypełnia się produktem SutriSept® w Gel Hydrożel na rany. W przypadku mniejszych ran wystarczy użycie samego produktu SutriSept® w Solution Płyn na rany.

## Środki ostrożności

1. Przed użyciem należy przeczytać instrukcję używania.
2. Nie jest odpowiedni do stosowania na chrząstkę szklistą i w przypadku aseptycznych operacji stawów, w uchu środkowym i wewnętrznym, nie można go aplikować do oczu.
3. Jeżeli u pacjenta rozpoznano lub podejrzewa się nadwrażliwość na którykolwiek składnik wyrobu.
4. W obrębie ośrodkowego układu nerwowego i opon mózgowych.
5. Razem z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, mydłami, olejkami, enzymami itp., substancje te należy dokładnie usunąć z powierzchni rany przed zastosowaniem wyrobu.
6. Do płukania i przemywania otrzewnej.
7. Nie stosować w pierwszych czterech miesiącach ciąży. W zależności od oceny korzyści w stosunku do ryzyka stosowania płynu SutriSept® w Solution w późniejszym okresie ciąży należy oceniać zgodnie z zaleceniami lekarza.
8. Nie wolno podawać we wlewach dożylnych ani iniekcjach.

<sup>1</sup> Percival S. L. i in.: *Mode of action of poloxamer-based surfactants in wound care and efficacy on biofilms*, *Int Wound J.* 2018; 1-7.

<sup>2</sup> M. Kucharzewski i wsp., *Algorytmy i wytyczne postępowania terapeutycznego w ranach trudno gojących się*, „*Forum Leczenia ran*” 2020, 1(3), 95-116.

<sup>3</sup> Kramer A., et al.: *Konsensus w sprawie antyseptyki ran: Aktualizacja 2018, Consensus Guidelines*, *Skin Pharmacol Physiol* 2018; 31:28-58