

Temblak kończyny górnej PANI TERESA rozmiar S x1 sztuka



Cena: 51,56 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Podmiot odpowiedzialny	Sigvaris
Postać	temblak
Typ produktu	wyrób medyczny inny

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- jako opatrunek podtrzymujący opatrunek gipsowy
- po zdjęciu opatrunku gipsowego – podczas rehabilitacji
- jako opatrunek doraźny w przypadku złamania kości przedramienia lub zwichnięcia stawu łokciowego

Tabela rozmiarów

Rozmiar XS:

- Obwód klatki piersiowej: < 60 cm

Rozmiar S:

- Obwód klatki piersiowej: 60 - 75 cm

Rozmiar M:

- Obwód klatki piersiowej: 76 - 91 cm

Rozmiar L:

- Obwód klatki piersiowej: 92 - 107 cm

Rozmiar XL:

- Obwód klatki piersiowej: > 107 cm

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

- W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu klatki piersiowej, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

- Przedramię umieścić w kieszeni temblaka, kciuk zawiesić w przeznaczonym do tego „oczku” w wewnętrznej części temblaka. Taśmę przełożyć przez zdrowe ramię dopasowując odpowiednio jej długość za pomocą rzepów, a wzmocnienie ochronne na taśmie układając na szyi.

Przechowywanie:

- W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

- Prać ręcznie w wodzie o temp. 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

- Stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem.

SKŁAD SUROWCOWY:

Poliester 85% polipropylen 8% bawełna 4% poliamid 3%

GWARANCJA:

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Galeria

