

# Test ciążowy strumieniowy Baby Boom x1 sztuka

Cena: 6,31 PLN



## Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Podmiot odpowiedzialny	Paso-Trading
Postać	test
Typ produktu	wyrób medyczny inny, test diagnostyczny

## Opis produktu

Nasz test charakteryzuje się:

- wysoką skutecznością – dokładność testu, powyżej 99%, została potwierdzona badaniami laboratoryjnymi
- wczesnym działaniem – umożliwia potwierdzenie ciąży już po 7 dniach od zapłodnienia
- dokładnością – wysoka czułość testu, stężenie hCG od 25 mIU/ml
- łatwością w użyciu – wystarczy skierować pasek absorpcyjny bezpośrednio pod strumień moczu
- szybkością – wynik już po kilku minutach

Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, przeznaczony do użytku domowego, jednorazowego użycia. Jest to szybki test służący do oznaczania gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w próbkach moczu, w celu wczesnego rozpoznania ciąży u kobiet.

## ZASTOSOWANIE:

Wczesna diagnostyka ciąży.

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Dokładność testu:  $\geq 99\%$
- Czułość testu: stężenie hormonu hCG od 25 mu/ml

## ZASADA DZIAŁANIA

Test hCG jest szybkim, jednoetapowym testem immunochromatograficznym. Membrana z paskiem absorpcyjnym jest umieszczona nad paskiem z włókna szklanego, impregnowanym koloidalnym koniugatem cząsteczek złota i przeciwciał monoklonalnych przeciwko

hCG. Drugi pasek absorbujący, umieszczony na skraju płytki, wchłania nadmiar płynnej próbki. Na płytkę z membraną chromatograficzną nanosi się próbkę moczu.

W chwili kontaktu z membraną, próbka moczu rozpuszcza liofilizowany koniugat. W próbce reaktywnej antygen hCG przyłącza się do przeciwciał w roztworze koloidalnym. Podczas przemieszczania się koniugatu wzdłuż membrany, monoklonalne przeciwciała anti-hCG w obszarze testowym (T) wiążą się z kompleksem koniugatu hCG-złoto, tworząc różową linię (T). Dodanie każdej próbki powoduje pojawienie się różowej linii w obszarze kontrolnym (C). Linia ta tworzy się wskutek związania poliklonalnych przeciwciał mysich IgG (znajdujących się w obszarze kontrolnym) z koniugatem próbki i złota koloidalnego. Obecność linii kontrolnej oznacza, że test został przeprowadzony prawidłowo.

## SPOSÓB UŻYCIA:

- Przed wykonaniem testu zaczekaj, aż test osiągnie temperaturę pokojową.
- Ostrożnie wyjmij test strumieniowy z saszetki foliowej.
- Przytrzymaj test i zdejmij nasadkę w celu odsłonięcia paska absorpcyjnego.
- Skieruj pasek absorpcyjny w dół; trzymaj pasek absorpcyjny pod strumieniem moczu, przez co najmniej 5 sekund lub umieść go na co najmniej 20 sekund w zebranej próbce moczu, by został dokładnie zmoczony.
- Zakryj z powrotem test nasadką i poczekaj na pojawienie się kolorowych linii.
- Po 5 minutach odczytaj wynik testu. W zależności od stężenia hCG w moczu, pozytywny wynik może pojawić się już po 40 sekundach, mimo to odczekaj 5 minut w celu potwierdzenia wyniku. Wyniku nie należy odczytywać później, gdyż może być on błędny.
- Test przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Po odczytaniu wyniku wyrzucić test do pojemnika na śmieci, traktując go jako potencjalne źródło zakażenia.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Wyrób przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in-vitro. Tylko do użytku zewnętrznego,
- Przed wykonaniem testu należy uważnie przeczytać ulotkę informacyjną. Kolejne kroki należy wykonywać zgodnie z instrukcją,
- Nie używać testu po terminie ważności umieszczonym na foliowej saszetce,
- Każdy jednoetapowy strumieniowy test ciążyowy przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użycia,
- Nie używać testu, jeśli saszetka jest uszkodzona,
- Po otwarciu saszetki foliowej należy natychmiast wykonać test,
- Po odczytaniu wyniku test należy wyrzucić. Próbkę moczu i test należy traktować jako potencjalne źródło zakażenia. Unikać kontaktu ze skórą,
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- saszetka foliowa zawierająca strumieniowy test ciążyowy: 1 szt.
- instrukcja użycia: 1 szt.