

Test owulacyjny (LH) paskowy Baby Boom x1 sztuka

Cena: 9,38 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Podmiot odpowiedzialny	Paso-Trading
Typ produktu	wyrób medyczny inny, test diagnostyczny

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Diagnostyka owulacji

SPOSÓB UŻYCIA:

- Wyznacz dzień wykonania testu zgodnie ze wskazaniami w instrukcji użycia.
- Zanurz pasek testowym w pojemniczku z moczem na 15 sekund.
- Wyjmij pasek i połóż go na płaskiej, niechłonnej, czystej powierzchni.
- Po 10 minutach odczytaj wynik.
- Interpretacja wyniku zgodnie z załączoną instrukcją.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Wyrób przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in-vitro (IVD). Tylko do użytku zewnętrznego.
- Przed wykonaniem testu należy zapoznać się z instrukcją użycia. Kolejne kroki należy wykonywać zgodnie z instrukcją.
- Nie używać testu po terminie ważności umieszczonym na foliowej saszetce.
- Każdy test przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użycia nie należy używać ponownie tego samego testu.
- Nie używać testu, jeśli saszetka jest uszkodzona.
- Test wykonać natychmiast, po otwarciu saszetki.
- Po użyciu, test należy wyrzucić. Próbkę moczu i test należy traktować jako potencjalne źródło zakażenia. Unikać kontaktu ze skórą.
- Decydując się na użycie produktu nie należy przyjmować leków z hCG lub LH, ponieważ może to wpłynąć na wynik testu.

Ponadto ciąża, menopauza lub stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych w okresie wykonania testu może spowodować, że wynik testu będzie nie prawidłowy.

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dokładność testu: $\geq 99\%$
- Czułość testu: stężenie hormonu LH od 25 mIU/ml

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- paskowy test owulacyjny: 5 szt.
- instrukcja użycia: 1 szt.
- pojemniczek na moczu: 5 szt.